




Inhalt



1x EDTA-Röhrchen

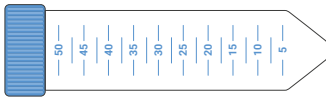

**1x Steriler konischer Versandbehälter,
Inhalt 50 ml (TM 1)**

Für Zellzahl, Kristalle, Kultur, PCR
(auch für Pleura- oder Ascitespunktat geeignet)

Vorgehen

1 EDTA-Röhrchen mit rotem Deckel für die Zellzahl.

Zur Vermeidung von Zellveränderungen sollte die Bestimmung der Zellzahl **am gleichen Tag** durchgeführt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten in der Praxis zusätzlich **Ausstriche angefertigt werden** (analog Blutbilder).

2 Steriler konischer Versandbehälter, Inhalt 50 ml (TM 1)

Für bakteriologische Untersuchungen, Kristalle, klinisch-chemische Untersuchungen und diverse Erreger-DNA-Nachweise (PCR).