



Für eine Immunphänotypisierung im Liquor sollte der Liquor direkt in ein Transfixröhrchen abgenommen und notfallmässig eingeschickt werden. Bitte schicken Sie möglichst viel Liquor (max. 4.5 ml) ein.

### **Lagerung, Stabilität und Transport der Transfixröhrchen**

- Lagerung der leeren Röhrchen in der Praxis bei +4°C Kühlschrank (bei Raumtemperatur höchstens 3 Tage)
- Der Liquor im Transfixröhrchen ist nur bei +4°C 3 Tage stabil (darf NICHT gefroren werden!).

