



Langzeit EKG – Ablauf für die Praxis

- 1** Die Anmeldung erfolgt mit dem ANA.MONITOR24-Bestellformular an monitor24@analytica.ch

Das Bestellformular muss vollständig ausgefüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die E-Mailadresse für die Befundübermittlung HIN-gesichert sein muss.
Wichtig! Anmeldung mindestens 3 Arbeitstage vor dem Patienten-Termin.
- 2** Das bestellte Langzeit EKG-Gerät wird durch unseren Kurierdienst in Ihre Praxis geliefert.
- 3** Das Langzeit EKG-Gerät wird der Patientin oder dem Patienten gemäss beiliegender Anleitung in der Praxis angelegt und erklärt.
- 4** Die Patientin oder der Patient wird instruiert, während der gesamten Laufzeit der Langzeit EKG-Messung ein Tagebuch zu führen und bei Beschwerden den Ereignisknopf zu drücken.
- 5** Nach abgeschlossener Langzeit EKG-Messung wird das Langzeit EKG-Gerät in der Praxis entfernt.
- 6** Für den Rückversand das Langzeit EKG-Gerät sowie das Tagebuch zurück in die Transportbox legen und das oben aufliegende Adressdeckblatt wechseln. Danach die Transportbox unserem Kurierdienst mitgeben.
- 7** Das Langzeit EKG wird von erfahrenen Kardiologinnen und Kardiologen ausgewertet. Die Resultate werden an die auf dem Bestellformular vermerkte (HIN-gesicherte) E-Mailadresse übermittelt.

Sie haben Fragen zum Ablauf oder zu unseren Geräten?
Unter der Telefonnummer **044 250 60 64** hilft Ihnen unser
MONITOR24-Team gerne weiter.