





## Inhalt

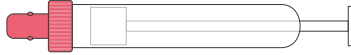

**1x EDTA-Röhrchen**

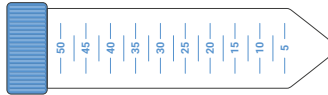

**1x Steriler konischer Versandbehälter,  
Inhalt 50 ml (TM 1)**

**Für Zellzahl, Kristalle, Kultur, PCR**

(auch für Pleura- oder Ascitespunktat geeignet)

## Vorgehen

**1 EDTA-Röhrchen** mit rotem Deckel für die Zellzahl.

Zur Vermeidung von Zellveränderungen sollte die Bestimmung der Zellzahl **am gleichen Tag** durchgeführt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten in der Praxis zusätzlich **Ausstriche angefertigt werden** (analog Blutbilder).

**2 Steriler konischer Versandbehälter, Inhalt 50 ml (TM 1)**

Für bakteriologische Untersuchungen, Kristalle, klinisch-chemische Untersuchungen und diverse Erreger-DNA-Nachweise (PCR).