





Inhalt

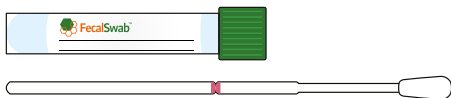


1x FecalSwab™ Abstrich-Set «Cary-Blair»
mit Röhrchen und Abstrichtupfer


Vorgehen

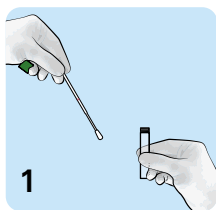


Röhrchen mit Patienten-
namen und Entnahme-
Datum beschriften. Den
Abstrichtupfer am hinte-
ren Ende aus der Verpa-
ckung nehmen und den
Rektalabstrich durch-
führen.

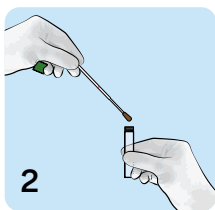

Jetzt den Abstrichtupfer
in das FecalSwab™ Röhr-
chen einführen.

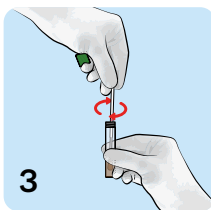

Abstrichtupfer mehrmals
im Röhrchen drehen, bis
die Flüssigkeit trüb ist.

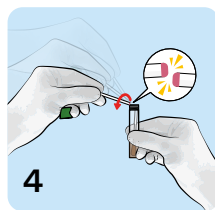

Den Abstrichtupfer im
Röhrchen belassen und
an der rot markierten
Stelle abbrechen. An-
schliessend mit Deckel gut
verschliessen.



Wichtig

- Nur für Stuhl-Panel-Kombinationen geeignet!
- Bitte Röhrchendeckel fest zudrehen