



Inhalt



1x Proberöhrchen*
(* Flüssigkeit **nicht** entfernen!)



1x Tupfer



1x Stuhlfänger



Stuhlröhrchen beschriften

Bitte das Stuhlröhrchen mit den **vollständigen Patientendaten** (Name, Vorname, Geburtsdatum) sowie dem **Entnahmedatum** beschriften.

Instruktionen auf der Rückseite







Vorgehen




Den Stuhlfänger gemäss Anleitung (beiliegend) auf dem Toilettenring **festkleben**.

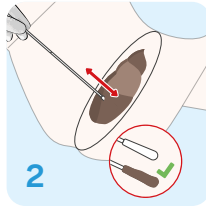

Den Tupfer aus der Verpackung nehmen. Die **Wattespitze** so tief in die Stuhlprobe stechen, dass sie **vollständig mit Stuhl umgeben** ist, und danach durch die Probe ziehen. Bei hartem Stuhl die Wattespitze an mehreren Stellen in die Stuhlprobe stechen.

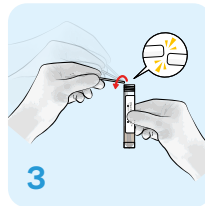


Den **Tupfer vorsichtig in das Röhrchen** führen und den Stiel an der gekerbten Stelle abbrechen. Das Röhrchen bitte **nicht** mit weiterem Stuhl befüllen.

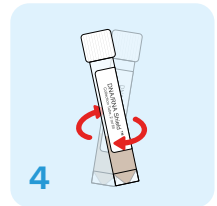

Das **Röhrchen** mit dem weissen Deckel **gut verschliessen** und **mehrmals hin und her schwenken**, bis der Stuhl gut mit Flüssigkeit benetzt ist.



6a

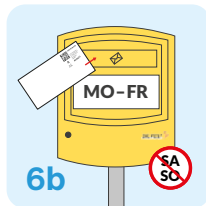

6b



6c

Das Röhrchen in die Versandtüte legen und die Versandtüte entweder gemäss **6a**, **6b** oder **6c** einsenden.

6a Die Versandtüte zurück in die Arztpraxis bringen.

6b Die Versandtüte zusammen mit dem entsprechenden Auftragsformular oder der Etikette eines elektronischen Auftrages per Post einsenden (Postversand: Montag bis Freitag, kein Versand über das Wochenende).

6c Die Versandtüte direkt in die Analytica bringen.



Stuhlfänger entsorgen

Nach der Probenentnahme den Papierstreifen an beiden Enden gleichzeitig vom Toilettensitz lösen und mit dem Stuhl in der Toilette entsorgen. Um den Abfluss zu erleichtern, sollten Sie vor dem Spülen einen Augenblick warten, bis das Papier ein wenig aufgeweicht ist.