





Inhalt

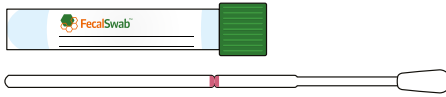


**1x FecalSwab™ Abstrich-Set «Cary-Blair»
mit Röhrchen und Abstrichtupfer**


Vorgehen

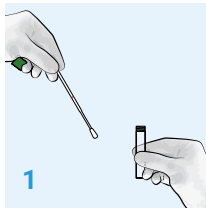


Röhrchen mit Patienten-
namen und Entnahme-
Datum beschriften. Den
Abstrichtupfer am hinteren
Ende aus der Verpack-
ung nehmen und den
Rektalabstrich durch-
führen.

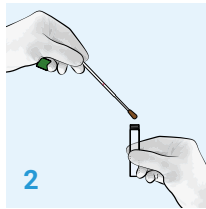

Jetzt den Abstrichtupfer
in das FecalSwab™ Röhr-
chen einführen.

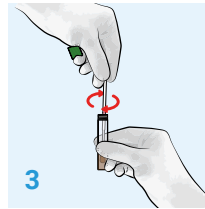

Abstrichtupfer mehrmals
im Röhrchen drehen, bis
die Flüssigkeit trüb ist.

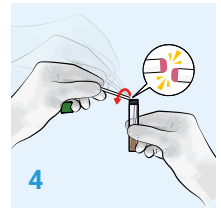

Den Abstrichtupfer im
Röhrchen belassen und
an der rot markierten
Stelle abbrechen. An-
schliessend mit Deckel
gut verschliessen.



Wichtig

- Nur für Stuhl-Panel-Kombinationen geeignet!
- Bitte Röhrchendeckel fest zudrehen