




Inhalt



1x ANALYTICA Box
1x Portagerm® pylori mit Agar

Für den kulturellen Nachweis von *Helicobacter pylori* inkl. Resistenzprüfung aus Magenbiopsien.

Transportmedium bis kurz vor der Entnahme im Kühlschrank lagern.

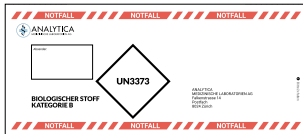

1x Notfall-Versandtüte

Vorgehen

- 1 Transportmedium auf Raumtemperatur bringen.
- 2 Transportmedium mit Patientendaten und Lokalisation der Biopsie beschriften.
- 3 Biopsie direkt in das Transportmedium einbringen und leicht in den Agar drücken (ca. 2 mm tief).
- 4 Transportmedium geschützt in der ANALYTICA Box verpacken und zusammen mit einem Auftragsformular oder einer Etiketle eines elektronischen Auftrags in die beigelegte Notfallversandtüte legen.
- 5 Einen **Notfallkurier** bestellen und die Notfallversandtüte währenddessen bei Raumtemperatur lagern.
- 6 Das Probenmaterial muss am **Tag der Entnahme** bei uns im Labor eintreffen, da eine kulturelle Anzucht von *Helicobacter pylori* sonst nicht mehr möglich ist.

Annahme Portagerm® pylori: Montag – Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr