



## Inhalt




1x UriSponge™-Röhrchen (TM 4c)




### UriSponge™-Röhrchen beschriften

Bitte das Röhrchen mit den **vollständigen Patientendaten** (Name, Vorname, Geburtsdatum) sowie dem **Entnahmedatum** beschriften.


## Vorgehen

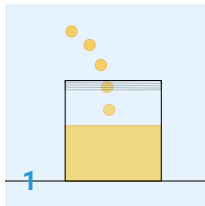

1 Eine Portion Mittelstrahlurin in ein **steriles Gefäss** lösen.

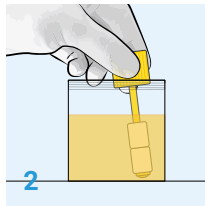

2 Das UriSponge™-Röhrchen öffnen und das Stäbchen mit dem Schwamm für **5 Sekunden** in die Urinprobe tauchen.

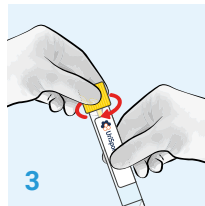

3 Anschliessend das Stäbchen mit dem Schwamm in das UriSponge™-Röhrchen zurückführen und dieses gut verschliessen. **Dem Röhrchen keinen zusätzlichen Urin hinzufügen!**

Die Probe im Kühlschrank lagern (48h Stabilität bei 4 – 8 °C), falls sie nicht am Entnahmetag unserem Kurierdienst mitgegeben wird.