


Inhalt

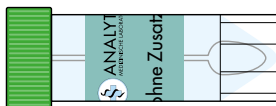

1x Stuhlröhrchen «ohne Zusatz» (TM 5c)



1x Stuhlfänger



Stuhlröhrchen beschriften

Bitte das Stuhlröhrchen mit den **vollständigen Patientendaten** (Name, Vorname, Geburtsdatum) sowie dem **Entnahmedatum** beschriften.

Instruktionen auf der Rückseite







Vorgehen




Den Stuhlfänger gemäss Anleitung (beiliegend) auf dem Toilettenring **festkleben**.

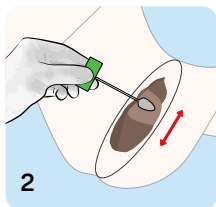

Das Stuhlröhrchen TM 5c öffnen und **mithilfe des Löffels**, welcher am Deckel befestigt ist, Stuhl vom Stuhlfänger aufnehmen.

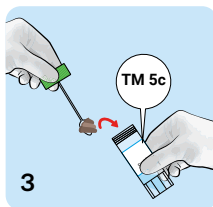

2 gehäufte Löffel Stuhl ins Stuhlröhrchen überführen. Den **Deckel gut verschliessen** und das befüllte Stuhlröhrchen **kühl lagern**.

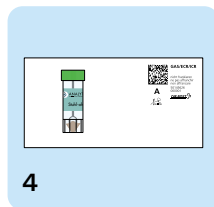

Das **gut verschlossene Stuhlröhrchen** in die **Versandtüte** legen. Die Versandtüte am Entnahmetag (spätestens am Folgetag) in der **Arztpraxis oder im Labor abgeben** oder **per Post versenden** (Postversand: Montag bis Freitag, kein Versand über das Wochenende).



Stuhlfänger entsorgen

Nach der Probenentnahme den Papierstreifen an beiden Enden gleichzeitig vom Toilettensitz lösen und mit dem Stuhl in der Toilette entsorgen. Um den Abfluss zu erleichtern, sollten Sie vor dem Spülen einen Augenblick warten, bis das Papier ein wenig aufgeweicht ist.