



ANALYTICA

Medizinische Laboratorien AG

Gefrierbox


Anleitung



1


Wichtig

Das Kühlelement ohne Styroporbox **liegend** einfrieren (mindestens 12 h bei ca. -20°C). Durch Schütteln prüfen, ob die gesamte Kühlflüssigkeit gefroren ist.

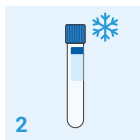


2

Die Röhrchen mit dem Probenmaterial separat einfrieren.

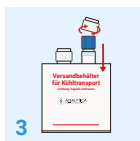

3

Die gefrorenen Röhrchen **erst kurz vor der Abholung** ins Kühlelement stecken und mit dem entsprechenden Deckel verschliessen.

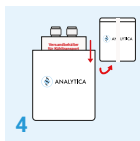

4

Das Kühlelement in die Styroporbox stecken und mit dem Gummiband sichern.

ANALYTICA Medizinische Laboratorien AG

Falkenstrasse 14 | 8024 Zürich | Tel 044 250 50 50

[analytica.ch](https://www.analytica.ch)