




Für eine korrekte Präanalytik und eine effiziente Probenverarbeitung sind folgende Punkte zu beachten:

Serum- / Stuhlröhrchen

- Pro Röhrchen nur **eine** Etikette verwenden
- Etikette **senkrecht und gerade** aufkleben
- Etikette **faltfrei** anbringen
- **Keine** zusätzlichen Klebestreifen verwenden
- Die Skalierung des Röhrchens **muss sichtbar** bleiben

Microvetten / Microtainer

- Pro Röhrchen nur **eine** Etikette verwenden
- Etikette **senkrecht und gerade** aufkleben; die L-Nummer befindet sich unten (nicht beim Deckel)
- Der überstehende Teil der Etikette darf **nicht zusammenkleben**
- Etikette **faltfrei** anbringen
- **Keine** zusätzlichen Klebestreifen verwenden
- Die etikettierten Röhrchen in eine **Analytica-Versandbox** für Blutröhrchen legen

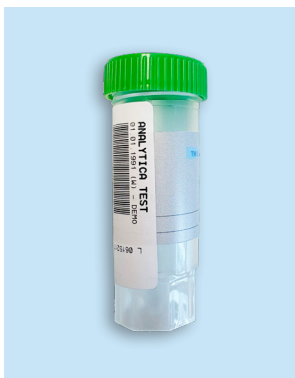

Vielen Dank für Ihre sorgfältige Umsetzung, die eine effiziente Probenverarbeitung ermöglicht.