




Positionierung der Langzeit EKG Elektroden

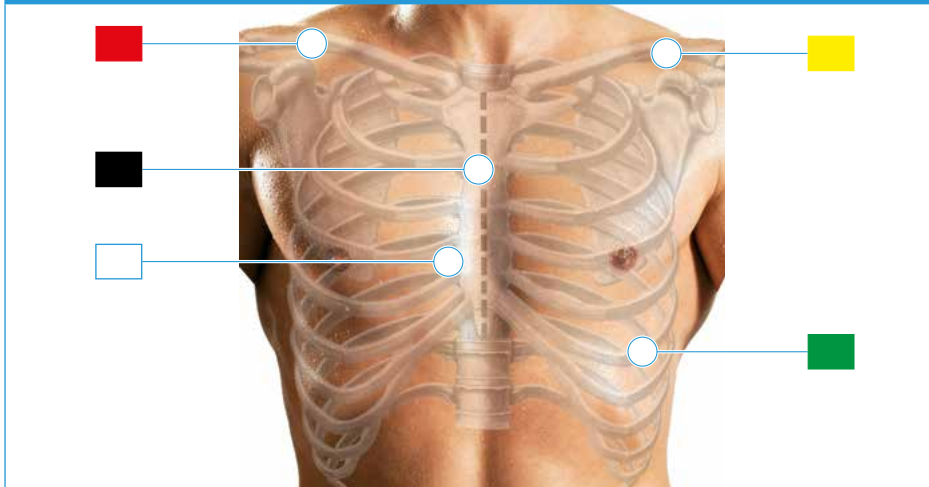

 Rechte Clavicula	 Linke Clavicula
 Referenz oder Erdleitung	 Linke Seite unterhalb der Rippenbögen
 Praecardiale Ableitung	



Wichtig!

- Das EKG-Gerät darf **nicht geöffnet** werden.
- Auf den Elektroden sollte **kein Zug** sein.
- Die Kabel **nicht knicken**.
- Mit dem EKG-Gerät darf **nicht geduscht** oder **gebadet** werden.
- Bitte mit dem EKG-Gerät **sorgsam umgehen**.

Einstellen des H3+ Holter

Start der Aufzeichnung


- 1 Entfernen Sie die **Batterie-abdeckung** des H3+ Rekorders, legen Sie die beigelegte AAA-Batterie ein und schliessen Sie die Batterieabdeckung wieder.



- 2 Durch Drücken der **Enter-Taste** können Sie die Menüanzeige wechseln.



- Überprüfen Sie, ob die Zeitangabe stimmt.

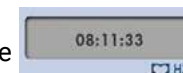

- Überprüfen Sie die ID-Nummer.




- Überprüfen Sie die Signalqualität.




- 3 Um die Aufzeichnung zu beginnen, drücken und halten Sie die **Enter-Taste** während 3 Sekunden. Ein **R*** zeigt an, dass die Aufzeichnung läuft.

R* = Recording = Aufzeichnung

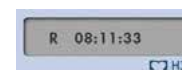

Markierung eines Ereignisses durch die Patientin oder den Patienten

Ein Ereignis kann die Patientin oder der Patient durch Drücken der Enter-Taste markieren. Ein ↓ zeigt an, dass zurzeit kein neues Ereignis markiert werden kann.

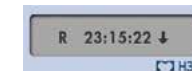

Beenden der Aufzeichnung

- 1 Öffnen Sie die Batterie-abdeckung
- 2 Entfernen Sie die Batterie
- 3 Schliessen Sie die Batterie-abdeckung
- 4 Entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäss

Sie haben Fragen zum Ablauf oder zu unseren Geräten? Unter der Telefonnummer **044 250 60 64** hilft Ihnen unser MONITOR24-Team gerne weiter.